

راهنمای آماده سازی بیمار، نمونه گیری و انتقال نمونه های بیمار برای آزمایش های :

Double Marker , Triple Marker, Quad Marker

۱- آماده سازی

۱-۱ بیمار نیاز به ناشتا بودن ندارد

۲-۱ هفته بارداری برای Double Marker ۱۱-۱۳ هفته + ۶ روز و برای Triple Marker یا Quad marker ۱۵-۲۲ هفته + ۶ روز می باشد

۳-۱ دارا بون گزارش سونوگرافی برای Double Marker که حاوی سن بارداری، NT، CRL (۸۴-۴۵ میلیمتر) و تاریخ سونوگرافی الزامی است.

و همچنین در Triple Marker و Quad Marker تاریخ سونوگرافی و سن بارداری نیز الزامی می باشد.

۴-۱ تا حد امکان توصیه میشود برای Double Marke ، انجام سونوگرافی و نمونه گیری در یک روز باشد.

۵-۱ تکمیل فرم مربوط به آزمایش سلامت جنین و پاسخگویی به تمام بندهای مورد درخواست (ستاره دار*) که شامل موارد زیر است:

نام- نام خانوادگی- تاریخ تولد- وزن- گروه خون- تعداد بارداری و سقط- تعداد قل بارداری- روش بارداری- سابقه مونگولیسم و نقص لوله عصبی(OSB) - دیابت(مصرف انسولین)- مصرف سیگار- آدرس و تلفن تماس و در انتها امضا و اثر انگشت

توجه: در صورتیکه از تخمک اهدا کننده استفاده می شود ، تاریخ تواد فرد اهداکننده الزامی است.

۲-نمونه گیری و جداسازی

۱-۲ حجم نمونه ۲ CC سرم خون میباشد که میتوان ۴-۵ میلی لیتر خون از بیمار اخذ کرد و حداکثر نیم ساعت پس از نمونه گیری در دور ۳۰۰۰-۳۵۰۰ rpm سانتریفیوژ را انجام داد و سرم را به لوله جداسازی منتقل کرد.

۲-۲ زمان نگهداری سرم ۵ روز در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد و حداقل ۳ ماه در دمای -۲۰ درجه سانتی گراد میباشد.

۳-۲ روی لوله جداسازی شده در صورت امکان علاوه بر نام بیمار ، تاریخ و ساعت جداسازی هم ذکر شود.

۳-انتقال نمونه

بهترین شرایط برای انتقال نمونه ۲-۸ درجه سانتی گراد میباشد و بسته بندی(با سه لایه پوشش) بایستی برای همه نمونه های سرم رعایت شود.

• زمان گزارش دهی آزمایشات Triple Marker - Quad marker - Double Marker

حداکثر ۷۲ ساعت میباشد به شرط اینکه مدارک و اطلاعات ارسال شده کامل باشد.